

# Verfahrensweisung Probenkennzeichnung

## 1. Dual Swabs

→auspacken

## 2. Probenahme

→bitte nur den großen Tupfer (links) verwenden!

groß

klein

## 3. Barcodes

→Pro Patient gibt es eine Charge Barcodes


## 4. Probe

→im Gefäß fest verschließen



→der 1. Barcode auf die Probe.

Die farbliche Markierung muss zum gelben Deckel zeigen!!!

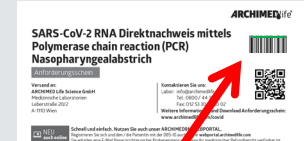

→der 2. Barcode auf die Überweisung

→ Verwenden Sie die Barcodes für weitere Dokumente dieses Patienten  
**Wichtig!** =Die restlichen Barcodes dieser Charge verwerfen!

